

JZIKI Digitális vérnyomásmérő - ZK-B872 - Használati útmutató

A termék 2 ember adatait tudja tárolni, mérés előtt az "S" gombot hosszan tartva tudja kiválasztani, hogy melyik profilon szeretné elvégezni a mérést.

A termék összesen az előzetesen mért 99 mérési adatot tárolja, ha eléri ezt a számot, akkor törli a régi adatokat, és az újakat menti a helyére.

1. Helyezzen a termékbe 4 db AAA elemet
2. Távolítsa el a védőfóliát a termék elejéről.
3. Csatlakoztassa a mandzsettát a készülék bal oldalán található bemenetbe.
4. Helyezze fel a mandzsettát a felkarjára
5. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a mérés elkezdéséhez
6. Mikor a termék kikapcsolt állapotban van, nyomja meg hosszan a "S" betű gombját, a beállítások eléréséhez
7. A a beállítások kiválasztását az "M" betű megnyomásával tudja megtenni. Amint beállította a megfelelő dátumot/időt az "S" betű megnyomásával tudja elmenteni az adatokat.