

NE3



Wireless Visible Earpick User Manual

Felhasználási lépések

1. Szkenelje be a QR kódot hogy letöltse az applikációt



Válassza ki a
normál letöltést



Miután a letöltés befejeződött ez az
ikon fog megjelenni a telefonjában

2. Mielőtt használatba venné bizonyosodjon meg hogy a fültisztító
fejet beletette a megfelelő helyre és teljesen fel van töltve.



3. Módszer hogy csatlakoztassa telefonját a készülékhez.

(1) Tartsa lenyomva a
bekapcsológombot 2 másodpercig, amíg
a kék fény villogni nem kezd. Ez azt
jelenti, hogy készen áll az APP-hoz való
csatlakozásra



(3) Nyissa meg a fongoolt, és
engedélyezze a WIFI számára, hogy
megtalálja az eszközt a helyi hálózaton,
és csatlakozzon hozzá



(5) Ha ezzel a felszólítással találkozik
kattintson a "Próbáld tovább a WLAN-t"




(2) csatlakozzon a "fongool-xxxxxx"
hotspothoz



(4) Kattintson az indításhoz



(6) APP felhasználói felület

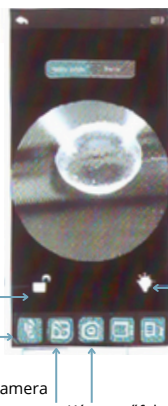


Oldal zárolása
Tükör album
Kamera
Képernyőfelvétel
Lencse világítás
vezérlés
Képernyő
forgatás

Termék Paraméterei

Termék neve:	NE3 Vezeték nélküli fültisztító
Súlya:	13g
Termék mérete:	145mm’ 13mm’ 11mm
Hálózati szabvány:	IEEE 802 11b/g/n
A jelvezeték:	antennával ellátott
Átvételi sebesség:	30fps
Működési gyakoriság:	2,4Ghz
Kép továbbító:	CMOS
Üzemi hőmérséklet:	10°C~50°C
Az akkumulátor kapacitása:	130mAh
Töltési idő:	60 perc
Bemeneti Áram:	DC 5V/150mA
Lencse belső átmérője:	3,6mm
Gyújtótávolság:	15mm~20mm
Pixel:	1296P
Gravitációs érzékelő:	3-tengely

Termék Részletek

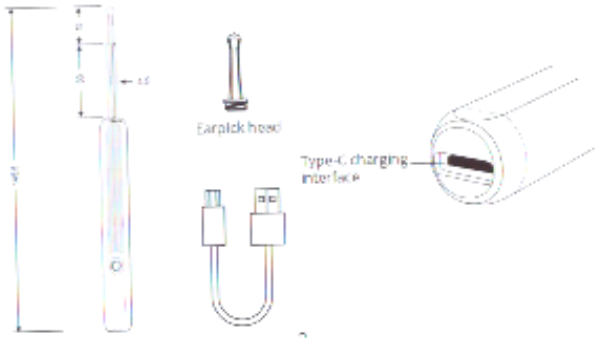

Meghibásodás	Megoldás
Nincs válasz bekapcsoláskor	Kérjük, próbálkozzon még többször a helyes használati lépések szerint
	Kérjük töltsen 80percen keresztül a hozzá tartozó töltőkábelrel.
A kamerája nem villan fel	Állítsa le majd indítsa újra
Nem lehet csatlakoztatni az applikációt	Törölje le az alkalmazást majd a QR kód beolvasásával töltsen le újra
Piros jelzőfény villog	Kevés töltöttségi szint, töltsen fel
A terméket csatlakoztatta az applikációhoz de nincs kép	Csatlakoztassa le a terméket és az applikációt. Állítsa le majd indítsa újra a készüléket és csatlakoztassa újra az alkalmazást
Az alkalmazás kapcsolata instabil	Kapcsolja ki készülékét és indítsa újra majd csatlakoztassa az alkalmazáshoz
Ha a fenti eltérések után is fennáll a meghibásodás, kérjük, próbálja meg felvenni a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A lehető legrövidebb időn belül kielégítő megoldást adunk Önnek.	

Fgyelmeztetés

1. A fülpiszkáló fejet a helyére kell szerelni, hogy megakadályozza az leesést.
2. Tilos olyan környezetben használni, ahol emberek mozognak.
3. Ez a termék nem alkalmas 6 év alatti gyermekek számára.
4. Gyermekek nem használhatják egyedül ezt a terméket a véletlen sérülések elkerülése érdekében.
- 5 Ne tegye ki a terméket közvetlen napsugárzásnak.
6. Van egy beépített újratölthető lítium akkumulátor. Ha ritkán használja, havonta egyszer töltsen fel.
7. Használat közben a termék hőmérséklete kissé megemelkedik (35 C alatt). Kérjük, érezze átélta a használatát.
8. A biztonság és a jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, üljön vagy álljon vízszintes testhelyzetben működés közben.
9. Kérjük, ne mossa le ezt a terméket víz alatt. Használjon alkoholos fűrész a lencse óvatos tisztításához.