

# Automata vérnyomásmérő felkarra - ZK-B869YB - Használati útmutató

A termék 2 ember adatait tudja tárolni, mérés előtt az "S" gombot hosszan tartva tudja kiválasztani, hogy melyik profilon szeretné elvégezni a mérést.

A termék összesen az előzetesen mért 99 mérési adatot tárolja, ha eléri ezt a számot, akkor törli a régi adatokat, és az újakat menti a helyére.

1. Helyezzen a termékbe 4 db AAA elemet
2. Távolítsa el a védőfóliát a termék elejéről.
3. Csatlakoztassa a mandzsettát a készülék bal oldalán található bemenetbe.
4. Helyezze fel a mandzsettát a felkarjára
5. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a mérés elkezdéséhez
6. Mikor a termék kikapcsolt állapotban van, nyomja meg hosszan a "S" betű gombját, a beállítások eléréséhez
7. A beállítások kiválasztását az "M" betű megnyomásával tudja megtenni. Amint beállította a megfelelő dátumot/időt az "S" betű megnyomásával tudja elmenteni az adatokat.

## Hibajelentés:

Szimbólumok	Hiba üzenet	Megoldás
<i>C2I</i>	Lemerült az akkumulátor	Cserélje ki az elemet a készülékben.
<i>Er 1</i>	Rendellenes érzékelő jel	1. Ne beszéljen vagy mozgassa a karját mérés közben. 2. A mérés előtt ürítse ki a légnyomást a mandzsettából.
<i>Er 2</i>	<u>Vérnyomásmérték</u> nem mérhető	Ellenőrizze a mandzsetta rögzítési helyzetét és mérje meg újra a használati útmutató szerint.
<i>Er 3</i>	A mérési eredmény abnormális	Ellenőrizze a mandzsetta rögzítési helyzetét és mérje meg újra a használati útmutató szerint.
<i>Er 4</i>	Nincs nyomás	Ellenőrizze, hogy a mandzsetta nem szivárog e. Ellenőrizze, hogy a mandzsetta túl laza-e.
<i>Er 5</i>	Túl gyors felfújás	Ellenőrizze, hogy a levegőcső nincs e eltömődve. Ellenőrizze, hogy a mandzsetta nincs-e szorosan rögzítve.
<i>Er 6</i>	Túlzott <u>nyomásinterferencia</u>	Mérés a használati útmutató szerint, ne mozogjon a mérés közben.
<i>Er 7</i>	A nyomás meghaladja a határértéket	Mérés a használati útmutató szerint, ne mozogjon a mérés közben.