

# Nagy Méretű, Forrólevegős Sterilizáló Gép Intelligens Hőmérséklet Szabályozással, Időzítővel - WX-12C



**Kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót használat előtt.**

## **Termék jellemzői**

Ez a termék távoli-infravörös fertőtlenítést alkalmaz, ami gyorsaságával, magas hatékonyságával, biztonságosságával és megbízhatóságával tűnik ki. Használható magas hőmérsékletnek ellenálló anyagok fertőtlenítésére (például: ollók és egyéb fém tárgyak, üvegpalackok és egyéb tartályok); nem alkalmas pamut, műanyag, papír és egyéb magas hőmérsékletnek ellenálló vagy gyúlékony anyagok fertőtlenítésére.

## **Műszaki paraméterek**

- Kapacitás: 12 L
- Feszültség: 220 V
- Teljesítmény: 1000 W
- Frekvencia: 50 Hz

## **Használati utasítások:**

Távolítsa el az összes kiegészítőt és csomagolást a fertőtlenítő szekrényből. Tisztítsa meg a rácsot és a tálcát meleg vízzel, törölje át a fertőtlenítő szekrény belsejét egy puha, detergenssel átitatott nedves ruhával, majd várja meg, amíg teljesen megszárad használat után.

A fertőtlenítő szekrény körül elegendő helyet kell biztosítani, hogy a felülete és más tárgyak között legalább 10 cm távolság legyen. A tetejére nem szabad semmit ráhelyezni.

### **Emlékeztető**

1. Első használat előtt a hőmérsékletet a legmagasabb fokozatra kell állítani, és 15 percig előmelegíteni, hogy eltávolítsa a maradék olajgőzt. Ez normális szaggal járhat, ha először használod. Ez teljesen rendben van, mert a fűtőcső védőréteggel van bevonva, hogy szállítás közben ne sérüljön meg.

2. Használat közben előfordulhat, hogy a fertőtlenítő cső kialszik – ez normális. A szekrény ugyanis eléri a beállított hőmérsékletet, majd automatikus hőszigetelés miatt a cső kialszik, és újraindul, amikor a hőmérséklet csökken.

3. Az ajtónál található rés a szekrény belső hőelvezetésére szolgál, ez normális működés része.

---

### **Időbeállítás**

Az időzítő 0–30 perc közé állítható, maximum 30 percre. Az időzítőt az óramutató járásával megegyezően kell elforgatni a kívánt időpontra. Amikor a beállított idő lejár, egy csengőhang hallatszik, és a fertőtlenítő szekrény automatikusan kikapcsolja az áramellátást.

---

### **Hőmérséklet-beállítás**

A legjobb eredmény elérése érdekében a sterilizáló négy különböző hőmérséklet-szabályozási lehetőséget biztosít. A készülék 100–250 °C közötti tartományban képes szabályozni a hőmérsékletet, így biztosítva a megfelelő fertőtlenítést.

---

### **Figyelmeztetés**

Amikor a fertőtlenítő szekrény működés közben van, illetve közvetlenül a működés befejezése után, szigorúan tilos vizet juttatni a belső fertőtlenítő csőre. A külső felület hőmérséklete nagyon magas lehet, ezért kérjük, ne érintse meg, és ne mozgassa a készüléket.